

Beschreibung zur Einstellung des Kliniknamens

Bedienung für das SSA-240A

Tosbee:

Für ENGLISCHE (DEUTSCHE) Preset-Einstellungen.

1. Gerät einschalten.
2. Die Taste MENÜ (Bedienfeld erste rechts über Trackball) betätigen. Am Rand des Bildschirms erscheint ein Auswahl-Menü.
3. Mit dem Trackball den Pfeil nach Other (Zusatz) bewegen.
4. Die Taste SET (START) betätigen (links über dem Trackball).
5. Die Taste NEXT (WEITER) betätigen (rechts über dem Trackball).
6. Mit dem Trackball den Pfeil nach Registration (Festdaten) bewegen.
7. Die Taste SET (START) betätigen (links über dem Trackball).
8. Mit dem Trackball den Pfeil nach Hosp.Name (Klinik Name) bewegen.
9. Die Taste SET (START) betätigen (links über dem Trackball).
10. Der aktuelle Krankenhausname kann jetzt in der untersten Zeile „Copy Line“ mit der alphanumerischen Tastatur eingegeben werden.
11. Zum speichern und verlassen des Menüs mit linkem Trackball den Pfeil auf die Position „Preset“ (Anwahl) im kleinen Auswahlmenü bewegen.
12. Die Taste SET (START) betätigen.
13. Mit der „Neuer Patient“ Taste gelangen Sie wieder zum gewohnten Bildschirm.